


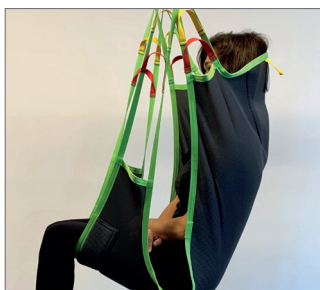

Confortable

Conception étroite

Appuie-tête



Harnais Silhouette Soft
No d'article 25019

Le harnais Silhouette est un harnais confortable sans renforts, poignées ou rembourrage. Il s'adapte au corps du patient pour offrir un bon soutien à l'ensemble du corps. Ce harnais peut être utilisé dans la plupart des situations de levage et est particulièrement adapté au transfert vers et depuis les fauteuils roulants, les sièges moulés ou les coques de sièges.



Harnais Silhouette Filet polyester
No d'article 25015

Deux choix de tissus

Le harnais Silhouette est disponible en filet polyester ou en maille filet souple, qui permettent tous deux un transfert efficace de l'humidité et de la température du patient. Ces harnais peuvent être laissés derrière le patient pendant une courte période après le transfert. Le tissu Polyester Net est souple, aéré et sèche rapidement, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les environnements de baignade.

Largeur totale réduite

Le harnais Silhouette a une largeur totale réduite, ce qui en fait une option idéale pour les utilisateurs de petite taille. Le harnais Silhouette peut être utilisé dans la plupart des situations de levage avec une suspension à 2, 3 ou 4 points et convient aux patients dont le tronc est peu stable. Les harnais Silhouette sont disponibles

dans les tailles Junior Small à Extra Large, ce qui permet de répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs.

Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Il est renforcé par des sangles et des sangles en nylon haute résistance autour du harnais, ce qui le rend suffisamment solide pour résister aux utilisations les plus intensives. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.



Dispositifs d'aide à
mobilité



Lits médicaux



Solutions de levage



Hygiène



Fauteuils de transfert
convertibles

Accessoires



Boucles d'extension
Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties N° de pièce 90707



Rembourrage et supports de jambe
Idéal pour les utilisateurs ayant la peau sensible ou souffrant de douleurs. No de pièce : 21146-S, M, L Supports renforcés. Taille unique. No de pièce 25102



Housse rembourrée
Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension. Ne pas utiliser dans un environnement humide. No de pièce 50866



Barres de suspension pour suspension à 2, 3 ou 4 points
Réf. no. 57551, 55764 (2 or 3-Point - dégagement rapide), 55619 (4 points - fixation au crochet de pied)


Levage



Utilisation vers/depuis un lit
Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.




Utiliser vers/depuis une chaise
Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.

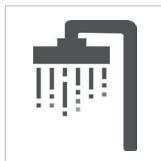


Utiliser pour la douche
Seul le tissu Polyester Net peut être utilisé pour cette application.

Soins et caractéristiques

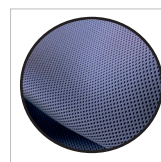

Maille aérée douce (Soft Air Mesh)
Matériau léger, frais et respirant. Convient aux peaux sensibles.

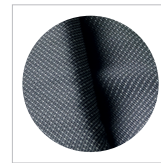

Filet Polyest
Matière douce et mince qui respire et sèche rapidement. Idéal pour le bain ou la douche.




Entretien
Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utiliser un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.

Spécifications techniques

Numéro d'article			Taille	Couleur	A	B	C
Filet en polyester	Polyester Net Matelassé au niveau des jambes	Maille aérée douce (Soft Air Mesh)					
25015-JS	25018-JS	25019-JS	Junior Small	JS	18 cm / 7,1 po	62 cm / 24,4 po	64 cm / 25,2 po
25015-JM	25018-JM	25019-JM	Junior Medium	JM	22 cm / 8,7 po	67 cm / 26,4 po	71 cm / 28 po
25015-S	25018-S	25019-S	Small	S	26 cm / 10,2 po	77 cm / 30,3 po	79 cm / 31,1 po
25015-M	25018-M	25019-M	Medium	M	29 cm / 11,4 po	87 cm / 34,2 po	90 cm / 35,4 po
25015-L	25018-L	25019-L	Large	L	35 cm / 13,8 po	93 cm / 36,6 po	96 cm / 37,8 po
25015-XL	25018-XL	25054-XL	Extra Large	XL	40 cm / 15,8 po	97 cm / 38,2 po	106 cm / 41,8 po
Poids maximum de l'utilisateur			300 kg / 660 lb				

* Disponible en longueurs assorties : 10 cm / 3,9 po [21180-10], 15 cm / 5,9 po [21180-15], 20 cm / 7,8 po [21180-20], 25 cm / 9,8 po [21180-25], 35 cm / 13,7 po [21180-35]

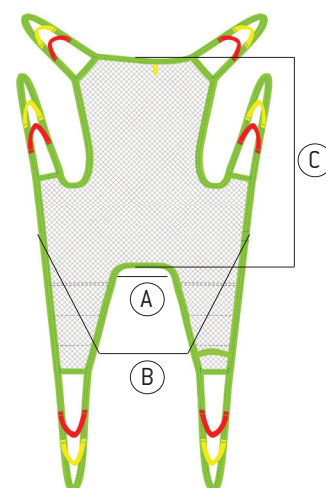

Nous améliorons la liberté de mouvement
et la qualité des soins aux personnes.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin, États-Unis
+1 512 76 7199
Courriel : info.us@humancaregroup.com