

Full Body Sling



Écartement
des jambes
Sièges inclinables
Appuie-tête

Polyester
Modèle no 25010



Filet en polyester
Modèle no 25005



Modèle
no 25010



Le Full Body Sling est un harnais confortable sans renforts, poignées ou rembourrage. Il est disponible en polyester ou en filet polyester et offre un bon soutien à l'ensemble du corps. Le harnais complet peut être utilisé dans la plupart des situations de levage et convient à la plupart des patients.

Conception polyvalente

Les harnais complets sont conçus pour créer une position assise inclinée, ce qui est extrêmement utile si le patient a une mauvaise stabilité du tronc et/ou une tendance à se surmener (performance spastique) ou s'il est hypertonique. La position inclinée empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais. Le support de tête renforcé en fait un harnais adapté au levage des patients à partir d'une surface plane telle que le sol.

Deux choix de tissus

Les harnais complets sont disponibles en polyester ou en filet polyester. Les deux peuvent être laissés derrière le patient

pendant une courte période après le transfert. Le tissu en polyester à faible frottement est facile à appliquer et à retirer et le filet en polyester est idéal pour la plupart des situations de baignade.

Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Il est doté de boucles renforcées et d'une sangle en nylon haute résistance autour de l'harnais, ce qui le rend suffisamment solide pour résister aux utilisations les plus actives. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.

HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Téléphone: +46 8 665 35 00
Télec.: +46 8 665 35 10
Courriel: info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Téléphone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Téléphone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
Courriel: info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78744
Téléphone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
Courriel: info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties N° de pièce 90707



Rembourrage et supports de jambe

Idéal pour les utilisateurs ayant la peau sensible ou souffrant de douleurs. No de pièce : 21146-S, M, L Supports renforcés. Taille unique. No de pièce 25102



Housse rembourrée

Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension. Ne pas utiliser dans un environnement humide. No de pièce 50866



Barres de suspension pour suspension à 2, 3 ou 4 points

Réf. no. 57551, 55764 [2 or 3-Point - dégagement rapide], 55619 [4 points - fixation au crochet de pied]

Levage



Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



Utiliser vers/depuis une chaise

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



Utilisation vers/depuis le sol


Adapté aux transferts depuis le sol.



Utiliser pour la douche


Seul le tissu Polyester Net peut être utilisé pour cette application.

Soins et caractéristiques

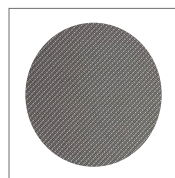


Polyester

Durable, à faible frottement, facile à nettoyer, à appliquer et à retirer.

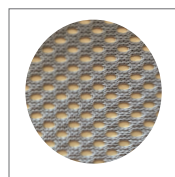

Filet en polyester

Matière douce et mince qui respire et sèche rapidement. Idéal pour le bain ou la douche.

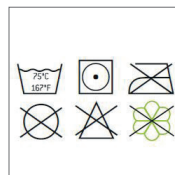

Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utiliser un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.



Spécifications techniques

Numéro de pièce	Taille	Couleur		Modèle no 25005			Modèle no 25010			
				A	B	C	A	B	C	
Filet en polyester	Polyester									Modèle no 25005
25005-JM	s.o.	Junior Medium	JM	22 cm / 8,7 po	71 cm / 28 po	80 cm / 31,5 po	-	-	-	
25005-S	25010-S	Small	S	26 cm / 10,2 po	76 cm / 29,9 po	86 cm / 33,9 po	31 cm / 12,2 po	85 cm / 33,5 po	90 cm / 35,4 po	
25005-M	25010-M	Medium	M	26 cm / 10,2 po	85 cm / 33,5 po	95 cm / 37,4 po	40 cm / 15,8 po	92 cm / 36,2 po	91 cm / 35,8 po	
25005-L	25010-L	Large	L	34 cm / 13,4 po	96 cm / 37,8 po	95 cm / 37,4 po	40 cm / 15,8 po	98 cm / 38,6 po	100 cm / 39,4 po	
25005-XL	25010-XL	Extra Large	XL	36 cm / 14,2 po	105 cm / 41,3 po	106 cm / 41,7 po	44 cm / 17,3 po	105 cm / 41,3 po	102 cm / 40,2 po	
s.o.	25010-XXL	Double Extra Large	XXL	-	-	-	44 cm / 17,3 po	111 cm / 43,7 po	106 cm / 41,7 po	
s.o.	25010-XXXL	Triple Extra Large	XXXL	-	-	-	44 cm / 17,3 po	118 cm / 46,5 po	108 cm / 42,5 po	
Poids maximum de l'utilisateur			300 kg / 661 lb							

* Disponible en plusieurs longueurs : 10 cm/3,9 po [21180-10], 15 cm/5,9 po [21180-15], 20 cm/7,8 po [21180-20], 25 cm/9,8 po [21180-25], 35 cm/13,7 po [21180-35]