

Activity Sling



Appuie-tête
Tailles pour en-
fant/adolescent
Épaulières



Le harnais d'activité est conçu pour aider les enfants ou les jeunes adolescents à s'entraîner à la marche ou à faire des exercices de rééducation. Le harnais d'activité est composé d'un filet en polyester et possède un dos allongé pour soutenir le cou et la tête pendant les mouvements.

Confortable

Le harnais d'activité est doté de sangles élastiques sur les côtés pour une flexibilité maximale pendant les mouvements. Avec un meilleur soutien de la tête et un rembourrage confortable des épaules, il permet de se déplacer plus confortablement et avec plus de confiance. Le harnais d'activités est conçu pour une suspension à 2 points et ne peut être utilisé qu'avec un lève-personne plafonnier.

Conception polyvalente

Le harnais d'activité est conçu pour soutenir le haut et le bas du corps, mais l'utilisateur doit avoir un certain contrôle de son corps pour pouvoir se déplacer, s'équilibrer et marcher pendant l'entraînement à la marche ou les exercices de rééducation. Le tissu en filet de polyester doux et

respirant possède une certaine élasticité qui lui permet de bouger avec le patient et la conception de type « pantalon » garantit que le harnais ne glisse pas vers le haut. Le harnais d'activités est mis en place en position couchée.

Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.

HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Téléphone: +46 8 665 35 00
Télec.: +46 8 665 35 10
Courriel: info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Téléphone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Téléphone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
Courriel: info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78744
Téléphone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
Courriel: info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties No de pièce 21180.*



Rembourrage des épaules

Confort renforcé Livré avec le harnais. Pièce de rechange no 25101



Housse rembourrée

Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension. Ne pas utiliser dans un environnement humide. No de pièce 50866

Levage



Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



Utiliser vers/depuis une chaise


Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un siège. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



À utiliser pour les exercices de marche et de mobilisation


Idéal pour les exercices de rééducation et d'entraînement à la marche.

Soins et caractéristiques

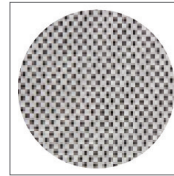

Filet en polyester

Matière douce et mince qui respire et sèche rapidement. Idéal pour le bain ou la douche.

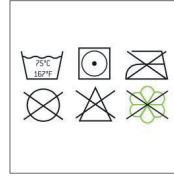


Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utiliser un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.



Spécifications techniques

Numéro de pièce	Taille	Couleur	Plage de poids	A	B	C
Filet en polyester			[Recommandé]	[Harnais ouvert]		
25100-JS	Junior Small	JS	15 kg - 20 kg / 33,1 lb - 44,1 lb	37 cm / 14,6 po	27 cm / 10,6 po	69 cm / 27,1 po
25100-JM	Junior Medium	JM	20 kg - 35 kg / 44,1 lb - 77,2 lb	39 cm / 15,3 po	30 cm / 11,8 po	75 cm / 29,5 po
25100-JL	Junior Large	JL	35 kg - 50 kg / 77,2 lb - 110,2 lb	41 cm / 16,1 po	33 cm / 13,0 po	81 cm / 31,9 po
25100-S	Small (Adolescent)	S	40 kg - 60 kg / 88,2 lb - 132,3 lb	43 cm / 16,9 po	39 cm / 15,3 po	87 cm / 34,3 po
Poids maximum de l'utilisateur	100 kg / 220 lb					

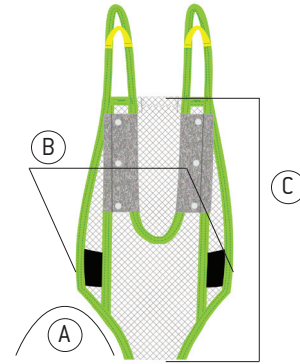

* Disponible en plusieurs longueurs : 10 cm/3,9 po (21180-10), 15 cm/5,9 po (21180-15), 20 cm/7,8 po (21180-20), 25 cm/9,8 po (21180-25), 35 cm/13,7 po (21180-35)